



## Reinigungshinweis und Handhabung für alle Patientenkelabel TELESMART



**Sie tun Ihrem Patientenkelabel einen Gefallen,** wenn Sie es beim Reinigen nicht am Stecker, sondern hinter dem Stecker an der Leitung richtig festhalten. So vermeiden Sie eine Belastung der Verbindung zwischen Stecker und Leitung. Beginnen Sie erst dann mit der Wischdesinfektion gemäß unseren Anweisungen.

Wenn Sie das Patientenkelabel vom Gerät trennen möchten, fassen Sie bitte den Stecker an, nicht das Kabel. Auch so schonen Sie die Verbindung zwischen Stecker und Leitung.

Berücksichtigen Sie bitte auch diese Hinweise zur Reinigung und Desinfektion Ihrer TELESMART Patientenkelabel:

- Die Elektrodenleitungen der TELESMART Patientenkelabel sind zur Wischdesinfektion mit den von Medset zugelassenen Mitteln geeignet. Das sind: Terralin Protect (Schülke und Mayr) sowie Hexaquant-Forte (B Brown).
- Lesen und beachten Sie die Produktdokumentation der Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
- Nach Ablauf der Einwirkzeit wischen Sie bitte die Elektrodenleitungen mit einem mit warmen Wasser getränkten Tuch ab, um den direkten Hautkontakt des Patienten mit eventuell eingetrockneten Rückständen des Desinfektionsmittels zu vermeiden.
- Halten Sie beim Abwischen der Elektrodenleitungen dieselben wie auf der Abbildung ersichtlich am Kabel, nahe dem Stecker, um Beschädigungen zu vermeiden und vermeiden Sie ein Knicken der Kabel.
- Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Flüssigkeiten mit elektrisch leitfähigen Teilen in Kontakt kommen. Achten Sie insbesondere darauf, dass Steckverbinder nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Die häufige Verwendung von Desinfektionsmitteln kann zu Verfärbungen von Kunststoffoberflächen führen. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist nach derzeitigem Stand der Technik nicht zu verhindern.
- Gebrauchsfertige Lösungen, die gelagert werden sollen, sind mindestens 0,5%ig anzusetzen. Gebrauchsfertige Lösungen sind längstens 28 Tage (Hexaquant Forte) bzw. 1 Jahr (Terralin Protect) nach dem Ansetzen verwendbar.
- Gebrauchsfertige Lösungen sind in fest verschlossenen Glas- oder Polyethylenbehältern aufzubewahren (Terralin Protect) und vor Verschmutzung zu schützen.

### Ihr Medset Team

Diese Anleitung betrifft:

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung
AAZ173032	Patientenkelabel 2, TELESMART (2-Kanal, 5-polig)
AAZ173033	Patientenkelabel 3, TELESMART (3-Kanal, 7-polig)
AAZ173031	Patientenkelabel M, TELESMART (3-Kanal, 3-polig)