

Installationsanleitung



Deutsch

Installationsanleitung

Sicherheitsupdate PADSYS-Holter
zum Betrieb mit
Langzeit EKG Recorder liveECG

GBA 11.12.001-00

PADSY-HOLTER

Sicherheitshinweise



Bitte nutzen Sie PADSY in Kombination mit liveECG erst nach der Installation des Sicherheitsupdates.

Installationsanleitung

Sie haben eine Mail mit dem Sicherheitsupdate für LiveECG erhalten. Spielen Sie das Update entsprechend folgender Anleitung ein:

- Speichern Sie die angehängte Datei **livetececg-1.5.dar** auf Ihrem Rechner in einem Verzeichnis Ihrer Wahl.
- Starten Sie PADSY.
- Wählen Sie im PADSY-Menübaum den Punkt „Werkzeuge“ und dann den Punkt „Hardware“.
- Wählen Sie auf der Tabkarte „Langzeit-EKG-Recorder“ den Eintrag „LIVETEC ECG“ aus und drücken Sie den Button „Einstellungen“.
- Prüfen Sie auf der Tabkarte „Info“ die Version des Treibers. Vor dem Update steht dort die **Version: 1.4**.
- Beenden Sie den Dialog „Geräteeinstellungen“ mit dem Button „Abbrechen“.
- Klicken Sie auf den Button „Neuer Treiber“.
- Drücken Sie Im Dialog „Treiber-Installation“ den Button „Durchsuchen“ und wählen Sie im Dateiauswahldialog die zu Beginn abgelegte Datei **livetececg-1.5.dar** aus. Beenden Sie den Auswahldialog mit dem Button „Öffnen“.
- Bestätigen Sie den Software-Lizenzvertrag und drücken Sie den Button „Weiter“.
- Vor dem Update werden die Daten noch einmal zusammengefasst angezeigt. Drücken Sie den Button „Weiter“.
- Das Update wird eingespielt. Drücken den Button „Fertigstellen“.
- Beenden Sie nun PADSY bitte komplett, also sowohl das PADSY-Window als auch den PADSY-Schnellstarter aus der Taskleiste.
- Starten Sie PADSY neu.
- Zum Überprüfen wählen Sie im PADSY-Menübaum den Punkt „Werkzeuge“ und dann den Punkt „Hardware“.
- Auf der Tabkarte „Langzeit-EKG-Recorder“ wählen Sie bitte den Eintrag „LIVETEC ECG“ aus und drücken Sie den Button „Einstellungen“.
- Auf der Tabkarte prüfen Sie nun bitte die Version des Treibers. Nach erfolgreichem Update muss dort die **Version: 1.5** stehen.

GBA 11.12.001-00

© Medset Medizintechnik GmbH April 2019

Medset, PADSY sind eingetragene Marken der Medset Medizintechnik GmbH.
Alle weiteren Marken und eingetragenen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Medset Medizintechnik GmbH
Curslackner Neuer Deich 66
D-21029 Hamburg
Deutschland

Telefon: 040 / 725 822-0
Fax: 040 / 725 822-11

e-mail: info@medset.com
<http://www.medset.com>